

Balso[®] Rhino

Neusspray

WAAROM BALSALO RHINO GEBRUIKEN?

Zwavelhoudend water

Luchon is een van de allereerste Franse kuuroorden die gespecialiseerd zijn in het behandelen van respiratoire aandoeningen. Luchon staat bekend om zijn natriumsulfidehoudend water dat van nature rijk is aan zwavel. Zwavelhoudend water helpt bij het vloeibaar maken en verwijderen van neusssecreties, bij het verminderen van de lokale tekenen van ontsteking en bij het versterken van het immuunsysteem van het slijmvlies.

Wat is Balso Rhino en in welke gevallen wordt het gebruikt?
Balso Rhino is een isotone oplossing op basis van thermaalwater van Luchon (een Frans hydrotherapiecentrum dat water produceert dat uiterst rijk is aan zwavel) voor het reinigen van de neusholtes, met name bij chronische of terugkerende aandoeningen, zoals rhinitis of rhinopharyngitis.

Balso Rhino oefent een mechanische reinigingswerking uit die de neus vrijmaakt en bijdraagt tot het onderhouden van de fysiologische activiteit van het neusslijmvlies.

Presentatie van het medisch hulpmiddel

Neusspray voor baby's, kinderen, volwassenen. Verpakking van 100 ml.

Samenstelling:

Thermaalwater van Luchon, natriumchloride. Oplossing zonder bewaarmiddelen. Drijfgas: perslucht zonder contact met het product. Fles 100 ml.

Hoe moet u Balso Rhino gebruiken?

Bij elke spoeling verstuift gedurende 2 tot 3 seconden in elk neusgat. Herhaal de handeling 1 tot 3 keer per dag, afhankelijk van de nasale verstopping.

Bij een zuigeling of jong kind:

- Vooraf de neus van het kind snuiten, uitgezonderd als u een neusreiniger voor baby's gebruikt (voer in dit geval de neusspoeling uit vóór het snuiten).
- Zorg ervoor dat u het kind op de rug legt voordat u Balso Rhino toedient.
- Draai het hoofd zijdelings en plaats het neusstukje van de verstuiver in het bovenste neusgat. Balso Rhino verstuiven.
- Wacht enkele momenten zodat de vloeistof op natuurlijke wijze in de neus vloeit, veeg dan de neus van uw kind af.
- Herhaal de operatie aan de andere kant.



Bij de volwassene:

- Draai het hoofd zijdelings en plaats het neusstukje in het bovenste neusgat.
- Verstuif in de neus door efficiënt op het neusstukje van de verstuiver te drukken.
- Wacht enkele momenten zodat de vloeistof op natuurlijke wijze in uw neusgat vloeit, veeg dan uw neus af.
- Herhaal de operatie in het andere neusgat en zorg ervoor dat het hoofd in de andere richting is gedraaid.



Contra-Indicaties:

Niet gebruiken in geval van allergie voor zwavel.

Voorzorgen bij gebruik:

Voor de hygiëne is het aanbevolen om het neusstukje te reinigen na elk gebruik en het te beschermen door middel van een hiervoor voorzien beschermingskapje.

Bewaringsvoorwaarden:

Opgeliet. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant:

PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES

29, avenue du Sidobre
81106 Castres Cedex - Frankrijk

Datum van herziening van de bijsluiter: 02/2018

Medisch hulpmiddel met CE-markering in: 2007

CE 0459

	Uiterste datum van houdbaarheid	LOT	Lotnummer.
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing	30°C	Hoogste waarde voor de temperatuur
	Uit het zonlicht bewaren		

Balzo[®] Rhino

Spray nasal

POURQUOI UTILISER BALZO RHINO ?

Eaux souffrées

Luchon est l'une des toutes premières stations thermales française spécialisées dans les cures pour affections respiratoires. Luchon est reconnue pour ses eaux sulfurrées sodiques, naturellement riches en soufre. Les eaux souffrées aident à fluidifier et à éliminer les sécrétions nasales, à réduire les signes d'inflammation locales, et à renforcer les capacités immunitaires de la muqueuse.

Qu'est-ce que Balzo Rhino et dans quels cas est-il utilisé ?

Balzo Rhino est une solution isotonique à base d'Eau Thermale de Luchon (un centre d'hydrothérapie français produisant de l'eau extrêmement riche en soufre) destinée au lavage des voies nasales, en particulier lors d'affections, chroniques ou récidivantes, telles que rhinites ou rhinopharyngites.

Balzo Rhino exerce une action mécanique de lavage qui dégage le nez et contribue au maintien de l'activité physiologique de la muqueuse nasale.

Présentation du dispositif médical

Spray nasal bébé, enfant, adulte.

Emballage 100 ml.

Composition :

Eau thermale de Luchon, Chlorure de sodium. Solution sans conservateur. Gaz propulseur: air comprimé sans contact avec le produit. Flacon 100 ml.

Comment utiliser Balzo Rhino ?

Au cours de chaque lavage, maintenir une pulvérisation de 2 à 3 secondes dans chaque narine. Répéter l'opération 1 à 3 fois par jour en fonction de l'obstruction nasale.

Chez le nourrisson ou l'enfant en bas âge :

- Moucher l'enfant préalablement, sauf en cas d'utilisation d'un mouche-bébé (dans ce cas réaliser le lavage nasal avant le mouchage).

- Prendre soin de coucher l'enfant sur le dos avant de lui administrer Balzo Rhino.

- Incliner la tête de l'enfant sur le côté et introduire l'embout pulvérisateur dans la narine supérieure. Pulvériser Balzo Rhino.

- Attendre quelques instants afin que le liquide s'écoule naturellement puis essuyer le nez de votre enfant.

- Répéter l'opération de l'autre côté.



Chez l'adulte :

- Incliner la tête sur le côté et insérer l'embout dans la narine supérieure.

- Effectuer les pulvérisations dans le nez, en appuyant efficacement sur l'embout pulvérisateur.

- Attendre quelques instants afin que le liquide s'écoule de votre narine puis essuyer votre nez.

- Renouveler l'opération pour l'autre narine, en prenant soin d'incliner la tête de l'autre côté.



Contre-indications :

Ne pas utiliser en cas d'allergie au soufre.

Précautions d'emploi :

Par mesure d'hygiène, il est recommandé de nettoyer l'embout après chaque utilisation et de le protéger à l'aide du capot protecteur prévu à cet effet.

Conditions de stockage :

Attention. Réceptif sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F. Tenir hors de la portée des enfants.

Fabricant :

PIERRE FABRE MEDICAL DEVICES

29, avenue du Sidobre
81106 Castres Cedex - France

Date de révision de la notice : 02/2018

Dispositif médical marqué CE en : 2007

CE 0459

	Utiliser jusqu'au	LOT	Numéro de lot
	Attention, lire attentivement la notice avant utilisation		Limite supérieure de température
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil		



Pierre Fabre